

Medical Solution Division

Ficha Técnica

Cinta de uso sanitario
Micropore™ Piel
1533

Abril 2023



Descripción

Cinta quirúrgica microporosa de color piel hipoalergénica

Características y beneficios

- * Cinta de color piel, mejora la apariencia estética en áreas anatómicas visibles como rostro, cuello y manos
- * Su respaldo microporoso facilita el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel.
- * Reduce el riesgo de maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo.
- * La cinta es hipoalergénica y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma
- * Su adhesivo acrílico es sensible a la presión, su nivel de adherencia aumenta en el tiempo.
- * Mantiene su adherencia aún en ambientes húmedos y/o aplicaciones prolongadas (>72 horas)
- * Buena adaptabilidad a sitios anatómicos complejos
- * Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente

Composición

Respaldo:	Fibras de rayón no tejido
Adhesivo:	Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión

Usos y aplicaciones

La cinta quirúrgica micropore color piel está recomendada para fijar vendajes, inmovilización y uso general en aplicaciones que se desee brindar un beneficio estético al paciente como:

- * Cirugía plástica, de cuello, oftálmica y de otorrino

- * Curaciones generales y curaciones menores
- * Indicado en pieles delicadas o frágiles como las de los pacientes neonatos, geriátricos, pediátricos y oncológicos bajo quimioterapia o radiación
- * Fijación de dispositivos en general, tales como líneas de catéteres centrales y periféricos, sondas, drenes, tubos orotraqueales, entre otros
- * Recomendado para fijación de vendajes con alta frecuencia de cambio
- * Fijación de apósitos pequeños o medianos y estabilización de tubos y drenajes livianos
- * Aseguramiento de los bordes de las bolsas de ostomía

Instrucciones de Uso

Seleccione el tipo y el tamaño adecuado de cinta para la aplicación; la cinta debe exceder al menos 2 cm más allá del límite del apósito o dispositivo

Corte el vello si es necesario

Aplique la cinta siempre sobre la piel limpia y seca

Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión

Evite tocar el adhesivo de la cinta

Si la cinta es colocada sobre una articulación posicione anatómicamente la zona del cuerpo antes de adherirla

Utilice tijeras para un borde más preciso

Para remover la cinta:

Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en forma lenta y en la dirección del crecimiento del pelo corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella

Inicie la remoción de la cinta con un trozo pequeño de cinta aplicada en una de las esquinas de la cinta adherida

La remoción puede ser facilitada haciendo uso de un removedor de adhesivo de uso médico o una loción humectante aplicada en el punto de remoción de la cinta

Precauciones y Advertencias:

No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel tales como desprendimiento epidérmico

Las cintas quirúrgicas son productos limpios, pero no estériles. Por lo tanto, no deben ser aplicadas directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV.

Elija la cinta adecuada de acuerdo a las características del dispositivo, la piel del paciente y el tiempo de aplicación requerido

Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

Vida útil del producto:

La cinta quirúrgica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final:

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación:

Referencia	Producto	Und / caja	Cajas corrugadas	Registro INVIMA	Clase de riesgo
1533-1/2"	Micropore™ Piel x 12 mm (3") x 9.1 m	24	10	2023DM-0026651	I
1533-1"	Micropore™ Piel x 24mm (1") x 9.1 m	12	10	2023DM-0026651	I
1533-2"	Micropore™ Piel x 48 mm (2") x 9.1 m	6	10	2023DM-0026651	I

Notas

Datos Técnicos:

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.

Uso del producto:

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES

Indemnizaciones:

Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Límite de la responsabilidad:

3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93

(571) 4161666 PBX

(571) 4161677 Fax

Bogotá

[Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co](http://www.3m.com.co) [Contáctenos](mailto:3mcontacto@mmm.com)

[email: 3mcontacto@mmm.com](mailto:3mcontacto@mmm.com)

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 01-8000-113636 Resto del País