

## Medical Solution Division

### Ficha Técnica

#### Venda elástica

#### Coban™

1581, 1582, 1583, 1584, 1586

Abril 2023



#### Descripción

Venda elástica autoadherente

#### Características y beneficios

- \* Soporte no tejido de poliéster con fibras elásticas de poliuretano distribuidas longitudinalmente para otorgar elasticidad.
- \* El vendaje contiene un material cohesivo que permite que se adhiera a si mismo, por lo que no requiere el uso de cintas, ganchos o alfileres para su ajuste
- \* Mantiene una compresión uniforme. No se desliza o afloja
- \* Permite el normal funcionamiento e intercambio de la piel al ser porosa, reduce el riesgo de maceración y el compromiso de la integridad de la piel
- \* Ligera, estética y altamente adaptable a zonas anatómicamente complejas, tales como codo, rodilla o talón.
- \* Fácil de aplicar y remover, puede ser reposicionada
- \* No se adhiere a la piel, al vello o a la ropa quirúrgica, ni deja residuos en la piel
- \* Liviana y resistente a la humedad. Fácil de secar si se expone al agua

#### Composición

Respaldo:	Tela no tejida a base de poliéster
	Fibras elásticas de poliuretano dispuestas longitudinalmente
Adhesivo:	Adhesivo cohesivo de caucho natural. Contiene Látex

## Usos y aplicaciones

La venda elástica Coban™ está diseñado para ser utilizada en múltiples aplicaciones clínicas, tales como:

- \* Vendajes de compresión o de soporte, quirúrgicos (neurocirugía, artroscopía, ortopedia, vascular, plástica), de protección y soporte de articulaciones
- \* En el ambiente deportivo como vendaje preventivo de lesiones musculoesqueléticas, en articulaciones de tobillo, rodilla, muñeca y dedos
- \* Para el control del edema en insuficiencia venosa (ver Coban™ 2)
- \* Aseguramiento de apósitos y dispositivos tales como férulas, tablillas para brazo, sensores de oxígeno, y la estabilización de líneas intravenosas
- \* Vendajes en áreas de difícil acceso como cabeza, dedos de pies y manos.
- \* Envoltura de férulas y yesos univalvos o bivalvos
- \* Soporte en esguinces y Straits
- \* Posicionamiento de miembros en salas de cirugía
- \* Soporte posterior a la remoción de yesos
- \* La venda elástica se puede usar en algunas de las funciones clínicas exigidas a una cinta, particularmente cuando la piel se encuentra muy frágil o delicada y por lo tanto, resulta no recomendable el uso de adhesivos sobre ella.

## Instrucciones de Uso

Aplique la Venda Elástica Cohesiva 3M™ Coban™ directamente desde el rollo. Desenrolle aproximadamente 30 cm de la venda estirando completamente el material y luego, reduzca el estiramiento a un 50% y aplique

Sin aplicar tensión, aplique una vuelta completa y sobreponga. Haga una presión ligera sobre el área sobrepuesta para asegurar el inicio del vendaje

Continúe con el vendaje, aplicando solo la tensión necesaria para obtener la compresión deseada.

Desenrolle el material antes de hacer el vendaje, para evitar aplicar el producto con mucha tensión

Cuando termine la aplicación, corte el exceso del vendaje. Asegure el final de la venda aplicando una ligera tensión

Se recomienda el uso de tijeras para cortar la venda elástica para un mejor terminado

### Precauciones y Advertencias:

La venda elástica cohesiva Coban™ es un producto limpio, pero no estéril. Por lo tanto, no debe ser aplicada directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV

No se afloja o se suelta después de su aplicación. NO envuelva con mucha tensión debido a que afectará la circulación del tejido y causar lesiones serias. El riesgo de impedir la circulación es mayor en los niños

Inspeccione el área de aplicación frecuentemente por signos de decoloración, dolor, entumecimiento, hormigueo u otros cambios de tipo sensorial o inflamatorio. Si se presenta alguno de estos síntomas, remueva el vendaje inmediatamente y contacte a un profesional de la salud

No utilice el vendaje en contacto directo con una herida abierta

Cuando la venda es utilizada como un componente de un sistema de compresión, es importante asegurarse que existe un adecuado flujo arterial de circulación. La venda elástica cohesiva Coban™ debe ser utilizada para este propósito clínico bajo la supervisión de un especialista en el cuidado de las heridas

No lo reúse. Reusarlo puede comprometer la integridad del producto y/o ocasionar una falla en el producto.

Este producto contiene Látex de caucho natural que puede ocasionar reacciones alérgicas

### Almacenamiento y vida útil

#### Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr. Manténgase alejado del calor y humedad excesivos. Para un mejor desempeño manténgalo en su empaque individual hasta su uso

#### Vida útil del producto:

La venda elástica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

#### Disposición final:

Disponga el producto después de su uso, según el protocolo de la institución para el desecho de materiales ordinarios, (bolsa gris). Si la venda se encuentra contaminada con material orgánico deséchelo como residuos de materiales de curación (bolsa roja)

#### Presentación:

Referencia	Producto	Und / caja	Registro INVIMA	Clase de riesgo
1581	Coban™ Rollos 1in x 5 yds	30	2023DM-0026707	I
1582	Coban™ Rollos 2in x 5 yds	36	2023DM-0026707	I
1583	Coban™ Rollos 3in x 5 yds	24	2023DM-0026707	I
1584	Coban™ Rollos 4in x 5 yds	18	2023DM-0026707	I
1586	Coban™ Rollos 6in x 5 yds	12	2023DM-0026707	I

## Notas

Datos Técnicos:

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.

Uso del producto:

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES

Indemnizaciones:

Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Límite de la responsabilidad:

3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93

(571) 4161666 PBX

(571) 4161677 Fax

Bogotá

[Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co](http://www.3m.com.co) [Contáctenos email: 3mcontacto@mmm.com](mailto:3mcontacto@mmm.com)

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 01-8000-113636 Resto del País