



División Hospitalaria

Campo de Incisión

loban™ 2

6640, 6648, 6650

01/26/2015

Ficha Técnica



Descripción

Campo de incisión estéril antimicrobiano

Características y Beneficios

- El campo de incisión 3M™ loban™ 2 otorga una actividad antimicrobiana continua que ayuda a reducir el riesgo de contaminación de sitio quirúrgico
- Proporciona una superficie estéril sobre la piel actuando como una barrera para prevenir la migración de la flora de la piel al sitio de incisión y una actividad antimicrobiana continua a lo largo de todo el procedimiento
- La película se adhiere de una manera segura a los bordes de la incisión, actuando como una barrera confiable a las bacterias de la piel
- Fabricados con una película flexible y respirable, que inhibe la penetración de los fluidos para reducir el riesgo de exposición a la sangre y fluidos corporales. Su adhesivo se encuentra impregnado con un antiséptico a base de yodo que le permite tener un efecto bactericida y bacteriostático
- Por su material flexible, resistente a la rotura, se ajusta fácilmente a los contornos corporales y evita el desplazamiento del sitio de incisión por retracción
- Producto de único uso. Disponible en varios tamaños para ajustarse a los diferentes procedimientos quirúrgicos
- De fácil uso que permite ahorrar tiempo en la preparación pre-quirúrgica de la piel
- De uso externo únicamente. Libre de Látex

Composición:

- Respaldo: Poliéster
 - Adhesivo: Adhesivo de Acrilato
Complejo iodóforo
 - Líner: Papel siliconado
 - Bolsa de Empaque: Papel y Polietileno
- No contiene látex*





Usos y aplicaciones

Los campos de incisión estériles 3M™ loban™ están diseñados como barrera mecánica a la flora de la piel con actividad antibacteriana continua, para cubrir la piel de paciente en procedimientos quirúrgicos tales como

- Cirugías mayores de ortopedia
- Cirugía cardiovascular
- Neurocirugía
- Cirugía abdominal mayor

:

Instrucciones de uso

- Realice la asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico según los protocolos de su institución o rutina recomendada por el especialista
- Deje secar completamente la piel
- Para poner correctamente el campo se recomienda seguir este procedimiento por dos personas, mientras una persona sostiene el borde no adhesivo la otra persona desprende el líner:
 - Sostenga el campo de incisión algunos centímetros sobre la piel intacta por los bordes no adhesivos
 - Desprenda el papel protector del adhesivo
 - Cuando el símbolo “stop” aparezca, detenga el desprendimiento del papel
 - Acerque los bordes no adhesivos de tal manera que se forme una “U” en la parte central del campo
- Usando una toalla estéril, aplique presión firme sobre la película, haciendo contacto primero en el área donde va a ser realizada la incisión, para asegurar un buen contacto con la piel
- Continúe pegando el campo sin aplicar tensión, alisando el campo desde el centro hacia los bordes para eliminar posibles arrugas o burbujas
- Continúe desprendiendo el papel líner hasta completar la aplicación del campo. Proceda a realizar la incisión
- Para remover retire lentamente el campo hacia atrás en un ángulo de 180°. Para esto doble completamente la película sobre sí mismo, manteniendo el ángulo mientras desprende la película de la piel.
- Durante la remoción sostenga el pulgar y la mano que retiran la película lo más cerca posible de la unión entre la película y el adhesivo. Con esto se evita el estiramiento
- La piel de los pacientes mayores es típicamente más frágil y requiere mayores cuidados cuando se aplican o remueven productos adhesivos como los campos de incisión

Precauciones y advertencias

- No desfibrilar a través de los campos de incisión plásticos, ya que la corriente puede formar un arco o producir una desfibrilización ineficiente
- No utilice el campo de incisión antimicrobiano loban™ 2 en pacientes con hipersensibilidad conocida al yodo
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.¹



Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr. Evite el calor y humedad excesivos

Vida útil del producto:

Los campos tienen 2 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	No. Catálogo	Referencia	Und. / Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70-2007-4532-4	6640	3M™ Ioban™ Campo de incisión con yodóforo 34 x 35cm	10	INVIMA 2009DM-0004682	III
70-2007-4533-2	6648	3M™ Ioban™ Campo de incisión con yodóforo 56 x 60cm	10	INVIMA 2009DM-0004682	III
70-2007-4534-0	6650	3M™ Ioban™ Campo de incisión con yodóforo 56 x 45cm	10	INVIMA 2009DM-0004682	III

1. Solo los campos de incisión Ioban empacados individualmente en envoltorio de aluminio se pueden esterilizar con OE. No esterilice con OE utilizando un vacío máximo, el límite de presión de vacío máximo para el envoltorio de aluminio es de 15inHgA. El gas óxido de etileno puede producir reacciones adversas al interactuar con el yodo

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co

Contáctenos

email: 3mcontacto@mmm.com

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá

01-8000-113636 Resto del País