


SUR-FIT® Natura® Stomahesive® Little Ones® Barrera Plana Recortable

DESCRIPCIÓN

Las barreras cutáneas Stomahesive están diseñadas para descargas del estoma semi-formadas o formadas. Estas barreras cutáneas confiables tienen una fórmula especial que permite a la barrera adherirse a la piel húmeda y seca. Se mantiene firmemente adherida a la piel mientras ayuda a protegerla de las descargas irritantes. Otra característica de las barreras cutáneas Stomahesive es que cuentan con una capa protectora externa, que ayuda a que se mantengan en su sitio. Las barreras cutáneas mantendrán la adhesión a la piel durante la realización de actividades que implican un mayor contacto con el agua tales como tomar una ducha, un baño y nadar. Adicionalmente, las barreras Stomahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar.

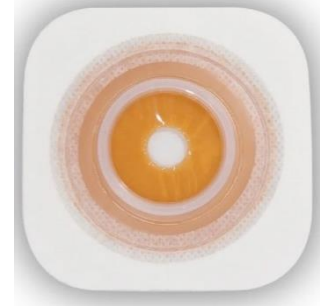

Componentes

- La barrera adhesiva es de forma cuadrada con bordes redondeados y un agujero central que permite el paso del estoma. Un lado de la barrera es laminada con una capa de polietileno y el lado adhesivo con un papel protector desprendible de silicona.
- El adhesivo de la barrera es una masa Stomahesive compuesta de gelatina, carboximetilcelulosa de sodio, pectina y poli-isobutileno. Cuenta con una pestaña centrada y adherida a la capa de polietileno de la barrera.

Características

- Protección de la Piel: La bolsa está cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad y aísla la piel del paciente evitando así irritaciones. Mantiene la piel seca y protegida.
- Bolsa Elaborada en Plástico resistente a fugas: Evita que los fluidos se filtren, y salgan los olores al exterior proporcionando así mayor Seguridad y comodidad al paciente.
- Ajuste perfecto: El aro Sur-Fit provisto de ocho broches de contención permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Sur-Fit minimizando los riesgos de desacoples accidentales.
- Sistema de drenaje seguro: La bolsa está provista de una válvula de drenaje flexible que cierra a presión y es fácil de manejar por el paciente.

Uso previsto

- Para el manejo de las descargas del estoma para uso pediátrico.

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

- **Preparación de la piel:** Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.
- **Preparación del protector de la piel:** Marque el contorno del estoma por las líneas del protector anti adhesivo del protector de la piel.
- Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, dejando al menos $\frac{1}{4}$ " (0,6 cm) del protector de la piel entre el borde del corte y el borde del protector.
- Alise la abertura del corte con sus dedos.
- **Aplicación del protector de la piel**
 - Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel.
 - Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma.
 - Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos.
 - En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector anti adhesivo, alíselo y elimine las arrugas.
 - Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta seguro. El tiempo de uso puede variar.
- **Remoción:** Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera

SUR-FIT® Natura®

Stomahesive® Little Ones®

Barrera Plana Recortable

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2025DM-0012578-R1 Ecuador: 2703-DME-0717	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario** Material de empaque: Bolsa de polietileno				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
401925	SURFIT NATURA L/ONE WFR 32MM	N/A	15,5 x 33	16
401926	SURFIT NATURA L/ONE WFR 45MM			

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.
- **Empaque primario únicamente para Colombia

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
401925	SURFIT NATURA L/ONE WFR 32MM	768455125517	17,7 x 6 x 17,7	363,2	5
401926	SURFIT NATURA L/ONE WFR 45MM	768455125524			

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
401925	SURFIT NATURA L/ONE WFR 32MM	10768455104120	20 x 62,2 x 36,3	7,8	20
401926	SURFIT NATURA L/ONE WFR 45MM	10768455104137			

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited - Reino Unido
Convatec Dominican Republic – República Dominicana

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

*Consultar registro sanitario de cada país

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec