

SUR-FIT Natura® Durahesive®

Barrera Convexa Moldeable con
Anillo Flexible Hidrocoloide

DESCRIPCIÓN

Las barreras convexas moldeables Durahesive están diseñadas para descargas del estoma semi-formadas o formadas. Estas barreras cutáneas confiables tienen una fórmula especial que permite a la barrera adherirse a la piel húmeda y seca. Se mantiene firmemente adherida a la piel mientras ayuda a protegerla de las descargas irritantes. Otra característica de las barreras cutáneas

Durahesive es que cuentan con una capa protectora externa, que ayuda a que se mantengan en su sitio. Las barreras cutáneas mantendrán la adhesión a la piel durante la realización de actividades que impliquen un mayor contacto con el agua tales como tomar una ducha, un baño y nadar.



Componentes

- Lámina de la bolsa: etilenvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas); panel de confort: fibra de polietileno / polietileno-tereftalato; pestaña: etilenvinil acetato; filtro con membrana médica, protección del filtro en lámina de polietileno.
- Adhesivo tr laminado de Durahesive® compuesto por gelatina, pectina y carboximetilcelulosa.
- Consisten de un anillo de soporte plano delgado de plástico (LDPE, siglas en inglés de Polietileno de baja densidad), adherido a un disco Durahesive (del lado del cuerpo) / Durahesive (del lado de la pestaña) tr laminado o coextruido con una lámina de polietileno en relieve en el centro. Se posiciona un collar (fibra recubierta de adhesivo hidrocoloide/adhesivo acrílico de fibra de poliéster) sobre el anillo de soporte y posteriormente una pestaña del lado del cuerpo (LDPE con colorante beige), en la parte superior.
- La pestaña, el collar y el anillo están adheridos entre sí. Una fina capa de liberación removible (poliestireno) cubre totalmente el lado adhesivo de la barrera.
- Con un hidrocoloide que mide de 1.61mm a 2.12mm +/- 0.07mm

Características

- Las barreras convexas Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son formadas o semi formadas.
- Adhesión: Las barreras Natura Durahesive cuentan con una fórmula especial que permite que la barrera se adhiera a la piel seca y húmeda; se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación y además cuentan con una capa protectora externa que las ayuda a mantener en su sitio.
- Protección de la piel: las barreras moldeables proveen un ajuste personalizado alrededor del estoma para ayudar a proteger la piel.
- Aplicación: Las barreras Durahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar debido a que cuentan con una pestaña que garantiza un cierre preciso mediante una serie de clics audibles.

Uso previsto

Para el manejo de las descargas del estoma

Instrucciones de uso

- Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.
- La piel que rodea el estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas.
- Preparación del protector de la piel
- No retire la cubierta transparente ni el protector antiadhesivo del protector de la piel. El protector de la piel se debe amoldar a la forma y al tamaño del estoma sin necesidad de utilizar tijeras. Para personalizar la abertura del estoma, coloque sus pulgares (o dedos) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar el adhesivo. Use sus pulgares (o dedos) para seguir enrollando el adhesivo hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados para su estoma. El adhesivo debe enrollarse. No estire, no tire y tampoco corte el adhesivo para hacerlo más grande. Aplique de inmediato luego de moldear.
- Aplicación del protector de la piel
- Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel; Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma; Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas; Con movimientos circulares, mantenga presionado el adhesivo contra el estoma durante 30 segundos.
- Remoción
- Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera

SUR-FIT Natura® Durahesive®
Barrera Convexa Moldeable con
Anillo Flexible Hidrocoloide

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2025DM-0012578-R1 Ecuador: 2518-DME-0517 Perú: DM14253E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario Material de empaque: Papel/PVC				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
404592	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM	00768455126668	14,8 x 14,8	26
404593	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM	00768455126675		
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM	00768455126682		

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
404592	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM	00768455104529	15,2 x 8,9 x 15,2	300	10
404593	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM	00768455104536			
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM	00768455104543			

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
404592	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM	10768455104526	17,7 x 46,7 x 31,2	3,4	10
404593	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM	10768455104533			
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM	10768455104540			



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido
Convatec Dominican Republic – República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside
Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ,
UK

*Consultar registro sanitario de cada país

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.
Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.
Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.
Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile Convatec