

SUR-FIT NATURA™ DURAHESIVE™

BARRERA PRE-CORTADA CONVEXA

DESCRIPCIÓN

Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para el manejo de descargas del estoma mayormente líquidas. A diferencia de otras barreras que se desintegran al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se expanden para proteger el estoma. Este efecto es llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. Las barreras Durahesive también son fáciles de acoplar, de aplicar y retirar. Adicionalmente, al ser convexa esta barrera permite manejar estomas planos, invaginados o retraídos. La Barrera Cutánea Sur-Fit Natura™ Durahesive™ Barrera Pre-Cortada Convexa debe ser utilizada junto con las bolsas SUR-FIT Natura.



Componentes

Consiste de una pestaña natural (LDPE) unida a un disco convexo delgado (etilenvinil acetato). Un collar cuadrado (adhesivo acrílico de fibra de poliéster) se acopla entre los bordes exteriores de la pestaña y el disco. Una capa de liberación de poliestireno translúcido cubre el borde adhesivo y de la cinta.

Uso previsto

Para el manejo de las descargas del estoma

Características

Las barreras Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son mayormente líquidas.

- **Adhesión:** Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación.
- **Protección de la piel:** A diferencia de otras barreras que se pueden desintegrar al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se ensanchan para proteger el estoma. Este efecto especial llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel.
- **Aplicación:** Las barreras Durahesive son fáciles de acoplar, aplicar y retirar debido a que cuentan con una pestaña que garantiza un cierre preciso mediante una serie de clics audibles.

Precauciones

Los pacientes con una urostomía a nivel de la piel, que esté asociada a megauréteres y a la ausencia de reservorio urinario, deberían saber que ha habido casos en los que se encontró adhesivo en el tracto urinario. Realice un manejo clínico adecuado y evalúe el uso continuado del producto adhesivo si detecta alguna masa.

Importante: El médico debería evaluar con anterioridad si es necesario usar protectores de la piel con convexidad.

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación de este.

La piel que rodea el estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas.

Aplicación del protector de la piel

Seleccione una barrera con una abertura de estoma pre-cortada que sea del mismo tamaño que el diámetro mayor del estoma. No agrande la abertura de estoma pre-cortada. Quite el papel de soporte.

Verifique que la adaptación alrededor del estoma esté bien ceñida.

Remoción

Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera

SUR-FIT NATURA™ DURAHSIVE™

BARRERA PRE-CORTADA CONVEXA

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2015DM-0012578 Ecuador: 2518-DME-0517 Perú: N/A	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario Material de empaque: bolsa de polietileno				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
413177	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM	768455124473	15 x 15	36
413178	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM	768455124480		
413179	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM	768455124497		
413180	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM	768455124503		
413181	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM	768455124510		
413182	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM	768455124527		
413183	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM	768455124534		
413184	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM	768455124541		
413185	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM	768455124558		
413186	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM	768455124565		
413187	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM	768455124572		
413188	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM	768455124589		

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
413177	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM	768455106370	15,2 x 13,3 x 15,2	520	10
413178	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM	768455106387			
413179	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM	768455106394			
413180	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM	768455106400			
413181	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM	768455106417			
413182	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM	768455106424			
413183	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM	768455106431			
413184	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM	768455106448			
413185	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM	768455106455			
413186	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM	768455106462			
413187	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM	768455106479			
413188	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM	768455106486			

SUR-FIT NATURA™ DURAHEIVE™

BARRERA PRE-CORTADA CONVEXA

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
413177	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM	10768455106377	32 x 47 x 28	6,8	12
413178	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM	10768455106384			
413179	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM	10768455106391			
413180	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM	10768455106407			
413181	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM	10768455106414			
413182	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM	10768455106421			
413183	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM	10768455106438			
413184	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM	10768455106445			
413185	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM	10768455106452			
413186	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM	10768455106469			
413187	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM	10768455106476			
413188	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM	10768455106483			



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

*Consultar registro sanitario de cada país

www.convatec.com**Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.**

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec