

Natura® Durahesive®

Barrera Moldeable Protectora de Piel
Reborde en Acordeón (Accordion Flange)

DESCRIPCIÓN

Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para el manejo de descargas del estoma mayormente líquidas. A diferencia de otras barreras que se desintegran al contacto con descargas líquidas, las barreras Durahesive se expanden para proteger el estoma. Este efecto es llamado cuello de tortuga, ayuda a crear un sello más seguro sin lesionar la piel. Las barreras Durahesive también son fáciles de acoplar, de aplicar y retirar. Se adherirán de forma segura a la piel en actividades en las que el contacto con el agua es mayor, tales como tomar duchas y nadar. La barrera de piel moldeable Natura con Reborde en Acordeón permite que los dedos sean colocados entre la barrera de piel y el reborde para acoplar la bolsa al reborde sin generar presión sobre el abdomen o el estoma.



Componentes

- Consisten de un anillo de soporte plano delgado de plástico (LDPE, siglas en inglés de Polietileno de baja densidad), adherido a un disco Durahesive (carboximetilcelulosa, gelatina, pectina) del lado del cuerpo / Durahesive (del lado de la pestaña, trilaminado o coextruido con una lámina de polietileno en relieve en el centro).
- Se posiciona un collar (fibra recubierta de adhesivo hidrocoloide/adhesivo acrílico de fibra de poliéster) sobre el anillo de soporte y posteriormente una pestaña del lado del cuerpo (LDPE con colorante beige), en la parte superior.
- La pestaña, el collar y el anillo están adheridos entre sí. Una fina capa de liberación removible (poliestireno) cubre totalmente el lado adhesivo de la barrera.
- El adaptador para la reducción de presión consiste en una pestaña de etilenvinil acetato.

Uso previsto

- Para el manejo de las descargas del estoma

Características

Las barreras Durahesive son ideales para aquellas personas cuyas descargas estomales son mayormente líquidas.

- **Adhesión:** Las barreras se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. El adhesivo es fácil de usar y enseñar a usar ya que se moldea fácilmente a cualquier tamaño de estoma.
- **Protección de la piel:** A diferencia de otras barreras que se pueden desintegrar al contacto con descargas líquidas, las barreras se ensanchan para proteger el estoma. Este efecto especial llamado cuello de tortuga, ayuda a que la barrera se ajuste de forma personalizada a cada estoma reduciendo la incidencia de fugas sin lesionar la piel.
- **Seguridad:** La Tecnología de Memoria de Rebote ayuda a que se mantenga la forma moldeada alrededor del estoma, creando un sello seguro alrededor del mismo. De igual manera, las barreras con Tecnología Moldeable se expanden y contraen con el funcionamiento del estoma, manteniendo un sello seguro durante el uso.
- **Practicidad:** La Tecnología Moldeable elimina la necesidad de cortar la barrera y por lo tanto, puede reducir la necesidad de usar accesorios adicionales para obtener un sello seguro alrededor del estoma. De igual manera, una vez aplicada a la piel, la porción de adhesivo se puede manipular y desenrollar para abrazar el estoma con el fin de asegurarlo correctamente.

Natura® Durahesive®

Barrera Moldeable Protectora de Piel
Reborde en Acordeón (Accordion Flange)

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

- **Preparación de la piel:** Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.
- **Preparación del protector de la piel:** No retire la cubierta transparente ni el protector antiadhesivo del protector de la piel. El protector de la piel se debe amoldar a la forma y al tamaño del estoma sin necesidad de utilizar tijeras. Para personalizar la abertura del estoma, coloque sus pulgares (o dedos) en el borde del orificio de entrada y comience a enrollar el adhesivo. Use sus pulgares (o dedos) para seguir enrollando el adhesivo hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados para su estoma. El adhesivo debe enrollarse. No estire, no tire y tampoco corte el adhesivo para hacerlo más grande. Aplique de inmediato luego de moldear.
- **Aplicación del protector de la piel:** Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel; Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma; Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector antiadhesivo. Alíselo y elimine las arrugas; Con movimientos circulares, mantenga presionado el adhesivo contra el estoma durante 30 segundos.
- **Use el producto** mientras le resulte cómodo y lo sienta seguro. El tiempo de uso puede variar.
- **Remoción:** Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera

| Esterilidad | Registros Sanitarios Región Andina | Vida Útil | Condiciones de almacenamiento |
|---------------------|--|-----------|---|
| Producto no estéril | Colombia: 2025DM-0012578-R1 Ecuador: 2174-DME-1116 Perú: DM11965E | 5 años | Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco. |

| Empaque Primario Material de empaque: Papel/PVC | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| REF (ICC) | Descripción | Código de identificación | Dimensiones (cm) [Largo x Alto] | Peso (g) |
| 421039 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 13-22 | 768455133819 | 15 x 1 x 15 | 36 |
| 421040 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 22-33 | 768455133826 | | |
| 421041 | NATURA LP70MM DHESIVE CMT 33-45 | 768455133833 | | |
| 421454 | NATURA LP45MM DHESIVE CTF | 768455189779 | | |
| 421458 | NATURA LP57MM DHESIVE CTF | 768455189816 | | |
| 421462 | NATURA LP70MM DHESIVE CTF | 768455189854 | | |

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Natura® Durahesive®

Barrera Moldeable Protectora de Piel
Reborde en Acordeón (Accordion Flange)

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

| REF (ICC) | Descripción | Código de identificación | Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto] | Peso (g) | Unidades por caja |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--|----------|-------------------|
| 421039 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 13-22 | 768455133192 | 15,2 x 88,9 x 15,2 | 300 | 10 |
| 421040 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 22-33 | 768455133208 | | | |
| 421041 | NATURA LP70MM DHESIVE CMT 33-45 | 768455133215 | | | |
| 421454 | NATURA LP45MM DHESIVE CTF | 768455138265 | | | |
| 421458 | NATURA LP57MM DHESIVE CTF | 768455138340 | | | |
| 421462 | NATURA LP70MM DHESIVE CTF | 768455138425 | | | |

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

| REF (ICC) | Descripción | Código de identificación | Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto] | Peso (kg) | Caja máster por |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------------|
| 421039 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 13-22 | 10768455133199 | 20 x 37,5 x 58,9 | 3,7 | 10 |
| 421040 | NATURA LP57MM DHESIVE CMT 22-33 | 10768455133205 | | | |
| 421041 | NATURA LP70MM DHESIVE CMT 33-45 | 10768455133212 | | | |
| 421454 | NATURA LP45MM DHESIVE CTF | 10768455138262 | | | |
| 421458 | NATURA LP57MM DHESIVE CTF | 10768455138347 | | | |
| 421462 | NATURA LP70MM DHESIVE CTF | 10768455138422 | | | |



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido
Convatec Dominican Republic – República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

*Consultar registro sanitario de cada país

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec