


ESTEEM™+ FLEX CONVEX UROSTOMÍA

Bolsa de urostomía drenable convexa de una pieza

DESCRIPCIÓN

Las bolsas convexas Esteem™ + Flex son dispositivos de urostomía drenables de una pieza que consisten en una bolsa colectora y una placa protectora de piel convexa y cortada. La placa adhesiva está unida al cuerpo alrededor del estoma, lo que permite que los efluentes del estoma se descarguen y almacenen en las bolsas colectoras.

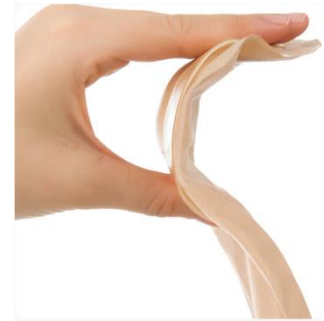

Componentes

Bolsa: Ambos lados presentan una película hecha de cloruro de polivinilideno (PVDC) y acetato de vinileno (EVA), cubierto por polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).

Ventana de inspección del estómago: Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).

Grifo de drenaje: Plegable, hecho de copolímero de acetato de vinileno. Si es necesario, se pueden acoplar a adaptadores para drenaje nocturno compuestos de elastómeros termoplásticos de poliestireno.

Placa protectora adhesiva: compuesta de hidrocoloides adhesivos compuestos de carboximetilcelulosa de sodio, pectina y poliisobutileno. La superficie de la placa consiste en una película de plástico transparente de acetato de vinileno (EVA) y cloruro de polivinilideno (PVDC), y el lado adhesivo está cubierto con un protector de poliéster con recorte impreso. Tienen dos ganchos a los lados, para fijar los cinturones de estoma, y están hechos de acetato de vinileno (EVA).

Características

- Protección de la piel: Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen la capacidad de regenerar la piel irritada.
- Múltiples medidas: Recortables y adaptables a diferentes tamaños y formas de estoma.
- Ventana transparente: Permite la visualización de efluentes.
- Funda de plástico resistente a fugas: Segura y cómoda para el paciente.
- Grifo de drenaje plegable: Drenaje rápido y fácil.
- Válvula antirreflujo: Permite que la orina fluya directamente hacia la bolsa y no regrese, evitando el contacto con el estoma.
- Tiene ganchos laterales para adaptar los cinturones de ostomía cuando sea necesario.

Uso previsto

Para el manejo de efluentes de estoma de urostomía.

Por favor, tenga en cuenta que existen distintos tipos de bolsa apropiadas para distintos tipos de estoma. Por favor, consulte con su profesional sanitario el tipo de bolsa más apropiada para su estoma, previamente a su uso.

Importante: Un profesional sanitario debería evaluar con anterioridad si es necesario el uso de apósitos convexos.

Precauciones

Este dispositivo es de un único uso y no debe ser reutilizado. Su reutilización podría aumentar el riesgo de infección y de contaminación cruzada. En caso de reutilización, las propiedades físicas de este dispositivo podrían no ser las óptimas para su uso previsto.

Para bolsas recortables, asegúrese de que la abertura que corta no es demasiado grande. Una bolsa mal ajustada puede causar irritación e inflamación de la piel. Tenga mucho cuidado de no aumentar el tamaño de la abertura pasado el anillo exterior marcado en el apósito o justo en el borde, en contacto con el disco de plástico convexo.

ESTEEM™+ FLEX CONVEX UROSTOMÍA

Bolsa de urostomía drenable convexa de una pieza

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación de este.

Preparación de la piel:

Limpie la piel alrededor de su estoma con agua y un paño suave. La piel debe estar seca. No utilice productos a base de aceite, ya que pueden interferir con la adhesión de la placa protectora de la piel adhesiva.

Preparación y aplicación de la bolsa:

Asegúrese del tamaño del estoma y recorte la medida adecuada utilizando la guía de medición impresa en la placa.

Infle parcialmente la bolsa soplando aire en el interior, permitiendo que las capas internas se separen.

Caliente la pegatina protectora de la piel con la palma de la mano durante unos segundos para ayudar a la adhesión.

Retire el plástico protector de la placa adhesiva y evite tocar el área adhesiva con las manos para no comprometer la adhesión del producto a la piel.

Sostenga la etiqueta protectora de la piel sobre su estoma.

Comenzando desde la parte inferior, aplique cuidadosamente la placa adhesiva alrededor del estoma.

Alise la parte posterior del área adhesiva con los dedos y presione suave pero firmemente alrededor del estoma.

El filtro de carbón debe estar protegido por el adhesivo provisto con las bolsas siempre que entre en contacto con la humedad: nadar, bañarse, etc..

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2015DM-0013357 Ecuador: 5517-DME-0918 Perú: DM20354E	3 años	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en lugar seco.

Empaque Primario** Material de empaque: bolsa de polietileno				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
421623	EST+FLEX CVX V1 CTF URO 10-43	768455197521	15 x 23	45
421624	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 15MM	768455197538		
421625	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 20MM	768455197545		
421626	EST+FLEX CVX V2 CTF URO 10-35	768455197552		
421627	EST+FLEX CVX V2 PCUT URO 15MM	768455197569		
421628	EST+FLEX CVX V3 CTF URO 10-25	768455197576		
421629	EST+FLEX CVX V3 PCUT URO 15MM	768455197583		

** Aplica únicamente para Colombia.

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

ESTEEM™+ FLEX CONVEX UROSTOMÍA

Bolsa de urostomía drenable convexa de una pieza

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
421623	EST+FLEX CVX V1 CTF URO 10-43	768455143375	24 x 17 x 6,3	500	10
421624	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 15MM	768455143399			
421625	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 20MM	768455143412			
421626	EST+FLEX CVX V2 CTF URO 10-35	768455143436			
421627	EST+FLEX CVX V2 PCUT URO 15MM	768455143450	24,1 x 22,9 x 7	--	--
421628	EST+FLEX CVX V3 CTF URO 10-25	768455143474	29,2 x 16,2 x 6,4		
421629	EST+FLEX CVX V3 PCUT URO 15MM	768455143498	--		

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
421623	EST+FLEX CVX V1 CTF URO 10-43	10768455143372	34,5 x 37 x 50	10,2	20
421624	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 15MM	10768455143396			
421625	EST+FLEX CVX V1 PCUT URO 20MM	10768455143419			
421626	EST+FLEX CVX V2 CTF URO 10-35	10768455143433			
421627	EST+FLEX CVX V2 PCUT URO 15MM	10768455143457	21,5 x 22,3 x 24,5	--	--
421628	EST+FLEX CVX V3 CTF URO 10-25	10768455143471	36,1 x 30,7 x 35		
421629	EST+FLEX CVX V3 PCUT URO 15MM	10768455143495	--		

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited - Reino Unido
 Convatec Dominican Republic – República Dominicana
 FOR LIFE PRODUKTIONS-UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
 FÜR HEIL-UND HILFSMITTEL MBH - Alemania

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
 CONVATEC ECUADOR S.A.
 CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
 First avenue, Deeside Industrial Park
 Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec