

NATURA®

Bolsas Cerradas Opacas con Filtro de Carbón Activado

DESCRIPCIÓN

Bolsa recolectora para uso en ostomías, con filtro que incluye una capa anti-obstrucciones y materiales amables con la piel



Componentes

Lámina de la bolsa: etilenvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas); panel de confort: fibra de polietileno / polietilen-tereftalato; pestaña: etilenvinil acetato; filtro con membrana médica, protección del filtro en lámina de polietileno.

Uso previsto

Las barreras están indicadas para el manejo de excreciones de:

Ostomías Digestivas:

- Ileostomías
- Yeyunostomías
- Colostomías
- Sobre todo, para pacientes que se irrigan.

Características

- Protección de la piel: Las bolsas para ostomías Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones. También están disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente.
- Tecnología para el control de olores - filtros de carbón: Las bolsas emplean un filtro diseñado específicamente para las necesidades de la persona que permite reducir los gases al interior de la bolsa, los olores y ayudan a mantener la bolsa con una apariencia más plana

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

- Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.
- Coloque y retire la barrera cutánea siguiendo las instrucciones de uso correspondientes
- Retire la bolsa cuando tenga un contenido entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$
- Cuando esté tomando una ducha, cubra el filtro con las cubiertas suministradas en el empaque.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2025DM-0012578-R1 Ecuador: 2178-DME-0916 Perú: N/A	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

NATURA®**Bolsas Cerradas Opacas con Filtro de Carbón Activado****Empaque Único**

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
416400	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 32MM(1X30) US	768455113187	12 x 16,5 x 23	340	30
416403	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 38MM(1X30) US	768455113217			
416406	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 45MM(1X30) US	768455113248			
416409	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 57MM(1X30) US	768455113279			
416412	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 70MM(1X30) US	768455113309			

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
416400	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 32MM(1X30) US	10768455113184	26,1 x 24,6 x 35,4	7,8	4
416403	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 38MM(1X30) US	10768455113214			
416406	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 45MM(1X30) US	10768455113245			
416409	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 57MM(1X30) US	10768455113276			
416412	NATURA+ PCH CLD WF STD TAN 70MM(1X30) US	10768455113306			

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited - Reino Unido
 Convatec Dominican Republic – República Dominicana

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
 CONVATEC ECUADOR S.A.
 CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
 First avenue, Deeside Industrial Park
 Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec