

NATURA™+

NATURA™+ BOLSA DRENABLE
CON FILTRO, CIERRE INVICLOSE, COMFORT PANEL, TRANSPARENTE Y OPACA

DESCRIPCIÓN

Bolsa recolectora para uso en ostomías, con filtro que incluye una capa anti-obstrucciones, materiales amables con la piel, sistema de cierre InvisiClose™ y bolsillo de seguridad Lock-it Pocket™ que esconde de manera segura el drenaje de la bolsa, proporcionando el confort de una bolsa cerrada.



Características

- Protección de la piel: Las bolsas drenables para ostomías Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones.
- Disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente.
- Tecnología para el control de olores - filtros de carbón: Las bolsas drenables emplean un filtro diseñado específicamente para las necesidades de la persona que permite reducir los gases al interior de la bolsa, los olores y ayudan a mantener la bolsa con una apariencia más plana.
- Sistema de cierre: el sistema de cierre sin pinza InvisiClose ofrece doble seguridad, facilidad de drenaje, comodidad y limpieza. El diseño de tiras del drenaje fáciles de abrir y el drenaje alargado permite el control de flujo y reduce las salpicaduras. El sistema de cierre está mejorado con una solapa adicional de seguridad para darle mayor tranquilidad al paciente.
- Bolsillo de seguridad Lock-it Pocket™ que esconde de manera segura el drenaje de la bolsa.
- Comfort Panel

Componentes

Caras de la bolsa: Película 5ply (Etilenvinil acetato (EVA) / EVA / Cloruro de Polivinilideno / EVA / EVA.

La cara de la bolsa hacia el cuerpo del paciente es de color piel, hacia el lado externo puede ser transparente u opaco (color piel).

Panel de confort y bolsillo: Bi-componente hidrofóbico de polietileno / tereftalato de polietileno no tejido

Tira de cierre InvisiClose: Copolímero de polipropileno heterofásico

Tira de sostén del sistema de cierre: Poliestireno con adhesivo

Espuma: Espuma de poliolefina

Filtro: Carbón activado con una matriz fina de fibra y 2 resinas de tereftalato de polietileno

Protector del filtro: Lámina de polietileno

Uso previsto

Para el manejo de los desechos estomales

Uso previsto

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado. Nota: En caso de ocurrir irritación, suspenda el uso y consulte a un profesional de atención médica.

La piel alrededor del estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas.

Instrucciones de uso

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLACA

Consultar manual de instrucciones

APLICACIÓN DE LA BOLSA

Para controlar el sello del reborde, presione en el fondo del reborde y muévase a la tapa del reborde. Varios "tecleos" pueden ser oídos.

USO DEL FILTRO

Deberá cubrir las aberturas del filtro con la tapa adhesiva para filtros mientras realiza cualquier actividad en el agua (baño de inmersión, ducha o natación).

Para impedir que la bolsa se infle demasiado, recuerde quitar la tapa después de realizar actividades en el agua y de haber secado la bolsa.

CÓMO USAR LA BOCA DE SALIDA INVISICLOSE™

INSTRUCCIONES PARA CERRAR LA BOLSA:

- El sistema de cierre de cola InvisiClose se compone de un faldón de seguridad, cierres entrelazables y tiras terminales de salida.
- Sostenga el faldón de seguridad contra la parte delantera de la bolsa, revelando los cierres entrelazables.
- Doble el extremo de la cola hacia arriba y hacia usted cuatro veces y asegúrese de que los cierres entrelazables se superpongan.
- Junte y apriete los cierres entrelazables hasta que sienta que se enganchan (CHASQUIDO) en posición en toda su extensión.
- Envuelva el faldón de seguridad alrededor de la parte posterior de la bolsa (lado del cuerpo) y junte y apriete los cierres entrelazables hasta que sienta que se enganchan (CHASQUIDO) en posición.
- INSTRUCCIONES PARA DRENAR LA BOLSA:
- Voltee la parte posterior de la bolsa (lado del cuerpo) hacia usted. Levante cuidadosamente el faldón de seguridad hacia usted para abrirlo.
- Sosteniendo el faldón de seguridad hacia arriba contra la parte delantera de la bolsa, abra los cierres entrelazables, levantándolos en la esquina y desenvolviendo los pliegues cuatro veces.
- Para facilitar el drenaje y/o limpieza, podrá abrir el extremo de cola, presionando ambos extremos de las tiras temrinales de salida con el dedo pulgar e índice.
- Si así se desea, la bolsa podrá limpiarse con jabón suave y agua. Séquese con cuidado.

RETIRO DE LA BOLSA Y LA PLACA: consulte manual de instrucciones.

DISPOSICIÓN

Se debe cumplir con los requisitos o reglamentaciones locales para disposición de residuos.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2025DM-0012578 Ecuador: 2178-DME-0916 Perú: DM12463E	5 años	Almacenar a temperatura entre 10°C - 30°C/50°F - 86°F. Mantener en lugar seco. Evitar la humedad alta.

Empaque Primario**

Material de empaque: bolsa de polietileno

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
416414	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 38MM	N/A	15,5 x 33	16
416416	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 45MM			
416419	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 57MM			
416422	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 70MM			
416415	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 38MM			
416417	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 45MM			
416420	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 57MM			
416423	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 70MM			

** Aplica solamente para Colombia.

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
416414	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 38MM	768455113323	29 x 5 x 16,5	200	10
416416	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 45MM	768455113347			
416419	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 57MM	768455113378			
416422	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 70MM	768455113408			
416415	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 38MM	768455113330			
416417	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 45MM	768455113354			
416420	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 57MM	768455113385			
416423	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 70MM	768455113415			

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
416414	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 38MM	10768455113320	35 x 31 x 36	3,4	14
416416	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 45MM	10768455113344			
416419	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 57MM	10768455113375			
416422	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE TRANSPARENTE 70MM	10768455113405			
416415	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 38MM	10768455113337			
416417	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 45MM	10768455113351			
416420	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 57MM	10768455113382			
416423	NATURA+ PCH DRN INVISICLOSE OPACO 70MM	10768455113412			

NATURA™+

NATURA™+ BOLSA DRENABLE
CON FILTRO, CIERRE INVICLOSE, COMFORT PANEL, TRANSPARENTE Y OPACA



Fabricantes:

Convatec Limited – Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec