

CINTURON

Cinturón para Dispositivo de Ostomia SurFit Plus®

Cinturón para Dispositivo de Ostomia

DESCRIPCIÓN

Cinturón elástico suave, antialérgico, graduable, no se enrolla ni maltrata la piel.



Características

Ajustable: Contiene dos broches plásticos en sus extremos que permiten ajustarlo a las aletas de las bolsas Sur-Fit Plus® de dos piezas (drenables, cerradas, Urostomía).

Multimedidas: Se puede ajustar al contorno del abdomen del paciente y permite graduarlo según necesidad.

Resistencia: El elástico es muy resistente y se puede lavar. Resiste varias lavadas.

Antialérgico

Comodidad y seguridad para el paciente: Se ajusta perfectamente a las aletas laterales de la bolsa Sur-Fit Plus® de dos piezas, evitando que la bolsa se caiga, brindando así mayor seguridad y ajuste sicológico al paciente sobre todo en la etapa inicial.

Componentes

El cinturón es fabricado en Nylon Blanco elástico con 100% de algodón y cosido con poliéster. Los ajustes triangulares y la hebilla para ajustar el largo del cinturón están fabricados en nylon blanco.

Uso previsto

El cinturón es un accesorio para sostener las bolsas del sistema de ostomía, se recomienda para personas activas, deportistas o quienes requieren mayor seguridad para llevar las bolsas de colostomía. También se recomienda para aquellas personas con estomas planos o invaginados ya que permite que el estoma sobresalga un poco más sobre la piel.

Instrucciones de Uso

- Colocar el cinturón de tal manera que la hebilla de graduación quede hacia fuera para que no haga presión sobre la piel.
- Ajustar el cinturón al contorno del abdomen del paciente de tal manera que no quede ni muy suelto ni muy ajustado.
- Los broches plásticos de los extremos del cinturón deben quedar bien ajustados sobre las aletas de las bolsas Sur-Fit Plus® del Sistema de dos piezas

CINTURON

Cinturón para Dispositivo de Ostomia SurFit Plus®

Cinturón para Dispositivo de Ostomia

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2020DM-0022713 Ecuador: N/A Perú: N/A	5 años	Protéjase contra la exposición externa, como altas temperaturas.

Empaque Primario				
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
175507	OSTOMY APPLIANCE BELT 42"	768455107186	12,6 x 3 x 3,5	24,3

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Terciario					
Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
175507	OSTOMY APPLIANCE BELT 42"	10768455170019	12 x 14 x 14	0,4	12

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited – Reino Unido

Convatec Dominican Republic – República Dominicana

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec