

ESENTA™

ELIMINADOR DE ADHESIVO ESENTA STING FREE TOALLITAS
ESENTA STING FREE ADHESIVE REMOVER WIPES

DESCRIPCIÓN

Toallitas para limpiar adhesivos médicos sin irritaciones ESENTA™



Características

- Formulación 100% silicona, sedosa y suave al tacto.
- Ayuda a minimizar el desprendimiento de la piel.
- Seca rápidamente (en 30 segundos) sin dejar residuos.
- Libera rápidamente los accesorios o apósitos adheridos a la piel.
- No causa escozor.
- Protege la piel de los efectos nocivos de los adhesivos: irritación, enrojecimiento, acumulación de residuos.
- Elimina rápidamente los residuos de adhesivos.
- Crea una superficie limpia sin afectar la adhesión del próximo material o apósito.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5.
- Amigable con el medio ambiente.

Componentes

91% Hexamethyldisiloxane, HDMSO
9% Octamethyltrisiloxane

Uso previsto

Eliminación de residuos de adhesivo de la piel.

Instrucciones de Uso

1. Desgarre el sobre para abrirlo y despliegue la toallita
2. Frote la toallita sobre los residuos de adhesivo para quitarlos

Precauciones

- Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección y contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto. Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas, y la legislación y los reglamentos locales.
- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Solo para uso externo

ESENTA™

ELIMINADOR DE ADHESIVO ESENTA STING FREE TOALLITAS
ESENTA STING FREE ADHESIVE REMOVER WIPES

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2021DM-0024336 Ecuador: 12569-DME-1221 Perú: DM22463E	4 años	Protéjase contra la exposición externa, como altas temperaturas. Radiación UV / luz solar.

Empaque Primario Material de empaque: Plástico y papel				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
423281	ESENTA™ Remover wipes	N/A	8 cm x 0,2 cm x 6 cm	3

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
423281	ESENTA™ Remover wipes	768455170012	10,2 cm x 6 cm x 8,4 cm	100	30

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
423281	ESENTA™ Remover wipes	10768455170019	21,5 cm x 32 cm x 18 cm	3,1	20

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited – Reino Unido
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec