

FOAMLITE™

FOAMLITE™ CONVATEC APÓSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA
FOAMLITE CONVATEC ADHESIVE

DESCRIPCIÓN

El apósito Foam Lite™ de ConvaTec es un apósito de espuma de poliuretano laminado en capas, delgado y cómodo. La capa más externa es una barrera viral y bacteriana de poliuretano a prueba de agua que protege la herida de la contaminación externa, ayudando a reducir el riesgo de infección; esta capa actúa como una barrera para la herida y tiene el potencial de protegerla contra las bacterias y los patógenos virales de transmisión sanguínea.

La superficie que se encuentra en contacto con la herida es una almohadilla absorbente en espuma recubierta con una capa de adhesivo suave de silicona perforada que proporciona una adhesión segura y cómoda con la piel.

El apósito Foam Lite™ de ConvaTec está diseñado para heridas secas y heridas con bajos niveles de fluido y ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida que puede ayudar a promover una cicatrización más rápida en la herida. El apósito Foam Lite™ de ConvaTec está diseñado para permanecer en su sitio sin la necesidad de adhesivos adicionales u otros medios de fijación. Foam Lite™ de ConvaTec puede reposicionarse durante la aplicación.



Características

- El suave adhesivo de silicona, respetuoso con la piel, ha demostrado un bajo potencial de irritación dérmica o de sensibilización alérgica por contacto.
- Adecuado para su uso en pieles frágiles (como los desgarros cutáneos)
- El adhesivo de silicona perforado y suave para la piel es fácil de aplicar, reposicionar y está diseñado para ser atraumático para la herida y la piel peri-herida al retirarlo.
- El apósito Foam Lite Convatec es un apósito de espuma fina con una película transpirable y un adhesivo de silicona perforado que no daña la piel.
- La película exterior proporciona una barrera impermeable, viral y bacteriana que ayuda a proteger la herida de la contaminación externa.
- Tres capas sinérgicas diseñadas para ayudar a la cicatrización húmeda de la herida.
- El apósito Foam Lite Convatec ha sido diseñado para su aplicación en heridas poco o nada exudativas.

Componentes

Borde de la lámina: Lámina de poliuretano y adhesivo acrílico

Espuma: Poliuretano

Trilaminado en contacto con la piel / herida: Silicona adhesiva, lámina de poliuretano, adhesivo acrílico

Lámina desprendible de protección: Polietileno de baja densidad

Uso previsto

Los apósitos Foam Lite de ConvaTec™ pueden ser utilizados para el tratamiento de heridas crónicas y agudas, tales como:

- Úlceras vasculares, úlceras por presión (Estadio II-IV) y úlceras de pie diabético;
- Heridas quirúrgicas (post-quirúrgicas, zonas donantes, dermatológicas);
- Quemaduras de espesor parcial (segundo grado);
- Heridas traumáticas o quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención tales como dehiscencias de incisiones quirúrgicas.

Para uso sin prescripción médica Foam Lite™ de ConvaTec puede ser usado para:

- Abrusiones;
- Laceraciones;
- Cortes menores;
- Escaldaduras menores y quemaduras.

FOAMLITE™

FOAMLITE™ CONVATEC APÓSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA
FOAMLITE CONVATEC ADHESIVE

Instrucciones de uso

1. Si el empaque inmediato estéril está dañado, no lo use.
2. Preparación y limpieza del sitio de la herida. Antes de aplicar el apósito limpie el área de la herida con un limpiador de heridas apropiado y seque la piel circundante. Asegúrese de que la piel circundante esté libre de cualquier roducto de base oleosa, ya que éstos pueden afectar la capacidad del apósito de adherirse a la piel.
3. Preparación del apósito y aplicación:
 - a) Escoja un tamaño y forma de apósito que asegure que la almohadilla central (área de espuma) es por lo menos 1/3 de pulgada (1cm) más grande que el área de la herida
 - b) Retire el apósito del empaque estéril. Retire la capa protectora del apósito haciendo el menor contacto posible entre sus dedos y la capa de adhesivo.
 - c) Sostenga el apósito sobre la herida y alinee el centro del apósito con el centro de la herida. Alise el apósito sobre la herida y asegúrese de que el apósito está cubriendo totalmente la herida
 - d) Los apósitos Foam Lite™ de ConvaTec pueden recortarse para fijarse sobre áreas irregulares (por ejemplo, talón, codo, dedos, etc.). Se requerirán medios de fijación adicionales para asegurar el apósito.
 - e) Descarte cualquier parte no usada del apósito después de cubrir la herida.
4. Retiro del apósito
 - a) El apósito puede permanecer en su sitio hasta por siete días, pero debe ser cambiado si se observan fugas, sangrado excesivo, aumento del dolor, sospecha de infección o si los bordes del apósito se pliegan o se enrollan.
 - b) Para retirar el apósito, cuidadosamente levante una esquina y suavemente despegue el apósito de la piel y deséchelo.

Precauciones

- Precaución: La esterilidad está garantizada a menos que el empaque esté averiado o abierto antes de el uso.
- Este dispositivo es solamente para uso único y no debe ser reutilizado. La reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del dispositivo pueden dejar de ser óptimas para el uso indicado.
- Este apósito para heridas no debería ser usado con otros productos para el cuidado de heridas sin consultar primero con un profesional para el cuidado de la salud.
- Durante el proceso normal de cicatrización, el manterial innecesario es retirado de la herida, lo cual puede hacer que la herida se vea más grande durante los primeros cambios de apósito. Si la herida continúa aumentando su tamaño después de los primeros cambios de apósito, póngase en contacto con un profesional para el cuidado de la salud.
- En caso de observar irritación (enrojecimiento, inflamación), maceración (blanqueamiento de la piel) o hipergranulación (formación de tejido en exceso), sensibilidad o reacción alérgica, consulte a un profesional para el cuidado de la salud.
- Consulte a un profesional de la salud si:
 1. Ocurren signos de infección (aumento del dolor, sangrado, aumento de temperatura / enrojecimiento del tejido perilesional, fluido en la herida)
 2. Hay un cambio en el color y/o olor de la herida
 3. La herida no comienza a cicatrizar
 4. Ocurre cualquier otro síntoma inesperado
- El apósito Foam Lite™ de ConvaTec puede ser recortado para darle forma según sea conveniente. Si el apósito es recortado, pueden requerirse métodos adicionales para fijarlo en su sitio. Si se recorta, las propiedades físicas del apósito pueden dejar de ser óptimas para el uso indicado.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto estéril	Colombia: INVIMA 2017DM-0017290 Ecuador: 2602-DME-0617 Perú: DM14071E	2 años	Almacenar a temperatura ambiente (10° C - 25° C/50° F - 77° F). Proteger de la luz. Mantener en lugar seco

FOAMLITE™

FOAMLITE™ CONVATEC APÓSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA
FOAMLITE CONVATEC ADHESIVE**Empaque Primario**
Material de empaque: Plástico y papel

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
421557	CONVATEC FOAM LITE 8 x 8 cm	768455142224	17,5 x 14	13
421559	CONVATEC FOAM LITE 10 x 10 cm	768455142231	18 x 14,5	
421561	CONVATEC FOAM LITE 15 x 15 cm	768455142248	22,5 x 19,5	16
421563	CONVATEC FOAM LITE 5.5 x 12 cm	768455142255	20 x 14,5	8

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
421557	CONVATEC FOAM LITE 8 x 8 cm	768455142262	18,5 x 6 x 15,4	160	10
421559	CONVATEC FOAM LITE 10 x 10 cm	768455142293		200	
421561	CONVATEC FOAM LITE 15 x 15 cm	768455142323	24 x 6 x 20,4	200	
421563	CONVATEC FOAM LITE 5.5 x 12 cm	768455142354	21,5 x 6 x 15,5	100	

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
421557	CONVATEC FOAM LITE 8 x 8 cm	10768455142269	40 x 57 x 18	2,9	18
421559	CONVATEC FOAM LITE 10 x 10 cm	10768455142290			10
421561	CONVATEC FOAM LITE 15 x 15 cm	10768455142320	43 x 32,5 x 27	2,1	14
421563	CONVATEC FOAM LITE 5.5 x 12 cm	10768455142351	33 x 46 x 23,5		14

**Fabricantes:**

ConvaTec Limited – Reino Unido

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.

*Consultar registro sanitario de cada país



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com**Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.**

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec