

# STERIS



## **INDICADOR QUÍMICO VERIFY 800510 MULTIPARÁMETRO PARA VAPOR FICHA TÉCNICA**

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

El Indicador Químico (Tirilla) para vapor 800510, caja por 250 unidades, es un indicador clase 4 multiparámetro para la esterilización mediante vapor. Se introduce en los paquetes, bandejas ó bolsas para esterilización con el fin de controlar los parámetros críticos del proceso de esterilización, que son: tiempo, temperatura y penetración del agente esterilizante (Vapor); de igual forma detecta errores en el procedimiento ó en el equipo, mediante un cambio de color amarillo a café verdoso ó negro, es decir que el cambio es a un color igual ó más oscuro del color estándar, cuando el dispositivo ha sido sometido al proceso de esterilización a 121°C, 132° ó 134°C.

### **INDICACIÓN DE USO**

El Indicador debe ir ubicado en el medio de cada paquete a esterilizar, en el caso de ropa y en paquetes de instrumental a un costado ó encima del instrumental.

Luego de procesado el Indicador verifique el cambio en la tirilla el Color estándar de cambio ó en la tabla de cambio de color del mismo.

### **ATENCIÓN**

Este dispositivo contiene un colorante que es seguro en condiciones normales de uso. Este producto no es apto para el consumo humano. No utilice el producto después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. Los indicadores caducan el primer día del mes indicado.

El no cambio del indicador indica:

- El mal posicionamiento del indicador dentro de los paquetes.
- El no cumplimiento de los parámetros requeridos en el proceso de esterilización, ya sea tiempo, temperatura ó penetración del agente esterilizante.
- Errores en el procedimiento ó en el equipo.

## **ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL**

Almacene todos los indicadores no utilizados a menos de 30°C, con una humedad relativa del 30-60% y lejos de la luz directa del sol. No almacene los indicadores cerca de fuentes de calor o humedad, de productos oxidantes, ácidos o alcalinos, ni de productos de limpieza o desinfectantes. Estas condiciones de almacenamiento se deben mantener también después del uso, esto es, cuando se archiva el indicador. El Color de los indicadores procesados se mantienen estables durante 12 meses, si se cumplen las condiciones de almacenamiento. Este producto no contiene plomo ni otros metales pesados y se puede eliminar con los residuos normales.

Deseche el Indicador luego de su almacenamiento por 12 meses, según protocolo de la Entidad.

## **LIMITACIONES DEL RENDIMIENTO**

- Este producto es de un solo uso. No vuelva a utilizar los indicadores parcialmente procesados.
- Los indicadores multiparámetro forman parte de un sistema de control de calidad para los controles de esterilidad. No pueden utilizarse como un único método de validación del proceso de esterilización.
- Los indicadores multiparámetro no deben ser utilizados por personas que sufren de daltonismo, en concreto para los colores usados en ellos. Asegúrese de que los usuarios pueden distinguir correctamente entre los colores de los indicadores procesados y no procesados.
- Todo personal implicado debe recibir formación sobre el uso adecuado de los indicadores y se debe crear un sistema de comunicación de los fallos.