



DESCRIPCIÓN GENERAL

El detergente Liqui-Jet 2 para instrumental es un líquido detergente altamente concentrado para el uso en lavadoras automáticas y ultrasónicas y en lavadoras de hospital/unidad de desinfección. El producto está diseñado para limpiar instrumental quirúrgico de acero inoxidable, que incluye aplicadores, cepillos para biopsias, cánulas, cinces, abrazaderas, cortadoras, disectores, fórceps, hemostatos, bisturíes, agujas de suturación, escalpelos, accesorios motorizados para instrumental quirúrgico (tales como brocas y hojas para sierras), y otros instrumentos. El detergente Liqui-Jet 2 para instrumental es seguro para su uso sobre aluminio y aluminio anodizado.

CARACTERÍSTICAS

Limpiador de alta calidad

Contiene agentes inhibidores

Líquido

Baja espuma

VENTAJAS

Elimina la sangre, la suciedad y las manchas comunes del instrumental.

Es eficaz para eliminar minerales de agua dura para una limpieza efectiva.

Puede dispensarse manual o automáticamente.

Apropiado para equipos de limpieza de instrumental automático y equipos ultrasónicos.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Forma	Líquido claro
Color	Incoloro a amarillo claro
Olor	Floral suave
pH típico (concentrado)	12
Gravedad específica típica	1,130
Alcalinidad total (como Na ₂ O)	4,5 a 4,9%
Alcalinidad disponible (como Na ₂ O)	1,9%
Presentación	Galón (3.78 Litros)

INSTRUCCIONES DE USO

El detergente Liqui-Jet 2 para instrumental puede alimentarse automáticamente de 1 a 15 mL/L en lavadoras descontaminadoras y ultrasónicas, dependiendo de las condiciones de dureza del agua. Luego de limpiar con el detergente Liqui-Jet 2 para instrumental, todas las superficies deben enjuagarse completamente con agua. La temperatura del agua debe basarse en las recomendaciones del fabricante del equipo. Las soluciones deben descartarse a diario o cuando estén muy sucias. Consulte las instrucciones de reprocesamiento recomendadas por el fabricante del dispositivo para determinar cualquier procedimiento adicional necesario para limpiar su producto sanitario en particular.

MANTENIMIENTO

Ventas

El mantenimiento es crucial para garantizar una calidad constante del funcionamiento y la eficacia del centro. STERIS proporciona un programa de mantenimiento personalizado que garantiza un funcionamiento eficaz y sin problemas.

Aspectos técnicos

Póngase en contacto con STERIS para obtener información con respecto a las aplicaciones del producto, el producto en general o para obtener copias de las hojas de seguridad. Para obtener información con respecto a la exposición en seres humanos o el medioambiente, llame al grupo de asuntos normativos de STERIS en St. Louis (EE. UU.), al 314-535-1395.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

STERIS[®]
 STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • EE. UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com