

SAF-GEL®

APÓSITO HIDRATANTE PARA HERIDAS DÉRMICAS CON ALGINATO

DESCRIPCIÓN

Gel hidratante y absorbente, no estéril, transparente y viscoso. Tiene la capacidad de humectar las heridas secas y también absorber el exudado de las heridas.



Características

Hidratación del tejido seco: penetrando en el lecho de la herida e hidratándolo para favorecer el Desbridamiento autolítico: remoción del tejido necrótico de forma natural y selectiva.

Medio Ambiente Húmedo: propicio para favorecer la promoción y formación del tejido de granulación y epitelización.

Mantiene el Ph ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano.

Gel hidratante de alta cohesividad: Fácil de aplicar y permite su cubrimiento con gasa.

Absorción de exudado moderado: Esta propiedad se la da la carboximetilcelulosa y el Alginato de Sodio/Calcio

Componentes

Agua purificada, Propilenglicol USP, Carbomero 940 NF, Trietanolamina, Ácido bórico NF, Alginato de sodio/calcio, Sorbato de potasio NF, DMDM hidantoína, Carboximetilcelulosa USP/DMDM hidantoína.

Instrucciones de Uso

Limpie cuidadosamente la herida con una solución limpiadora apropiada o solución salina. Seque la piel adyacente. Levante la tapa del tubo y aplique el gel directamente en la herida. No exceda el nivel de la piel alrededor de la herida. Se puede proporcionar un ambiente óptimo para la curación de la herida mediante el uso de un apósito que retiene la humedad, como Aquacel o Duoderm CGF. El apósito debe cambiarse diariamente o cuando drene o cuando la herida esté seca. El gel se puede eliminar enjuagando con la solución salina.

Uso previsto

Promueve un ambiente húmedo óptimo para el proceso natural de cicatrización de heridas. El gel con alginato puede ser usado en el manejo de heridas crónicas, incluyendo lesiones por presión, úlceras de pierna por estasis venosa, quemaduras de 1° y 2° grados, cortes, abrasiones y laceraciones de piel.

Precauciones

No debe ser usado por pacientes con conocida sensibilidad al gel o cualquiera de los ingredientes. En el manejo de lesiones por presión, otras acciones deben ser tomadas como el cambio de posición y brindar apoyo nutricional. En úlceras de piernas en pacientes con insuficiencia vascular (arterial o venosa), la falta de descanso adecuado puede agravar el edema local o retrasar la curación.

Para uso externo solamente. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si la condición empeora o no hay mejoría en los siguientes 10 a 14 días consulte a su médico. Para reducir la posibilidad de contaminación cruzada, se recomienda que el uso del tubo individual sea restringido a un mismo paciente.

SAF-GEL®

APÓSITO HIDRATANTE PARA HERIDAS DÉRMICAS CON ALGINATO

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2025DM-0001087-R2 Ecuador: 2006-DME-0716 Perú: DM27586E	2 años	Consérvese entre 15° y 30°C

Empaque Primario				
Material de empaque: Tubo de aluminio con tapa de polipropileno				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Diámetro x Alto]	Peso (g)
145730	SAF-GEL (12TUBEX3OZ) US	N/A	3 cm x 17,8	85

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario					
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
145730	SAF-GEL (12TUBEX3OZ) US	768455107896	17,9 cm x 3,6 cm x 4 cm	114	1

Empaque Terciario					
Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
145730	SAF-GEL (12TUBEX3OZ) US	10768455107893	15,5 cm x 15 cm x 19,5 cm	1,5	12

**Fabricantes:**

Convatec Limited – Reino Unido
Accupac, LLC – Estados Unidos
ConvaTec Inc – Estados Unidos

**Importadores:**

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.

**ConvaTec Limited**

First avenue, Deeside Industrial
Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec