

KANGAROO™

SONDA DE GASTROSTOMÍA ENFit

Ficha Técnica

Marca:	KANGAROO™
Clasificación de riesgo:	IIA
Método de esterilización:	EO
Vida útil:	60 meses

Sonda de recambio para la administración de nutrición, líquidos y medicamentos al estómago en pacientes que no son físicamente capaces de realizar la masticación y deglución normales de la ingesta nutricional. El puerto de alimentación es incompatible con las conexiones luer lock o IV, lo que reduce el riesgo de una conexión o infusión accidental. Disponible con conexiones enterales seguras para abordar la alerta de evento Sentinel de conexiones erróneas de tuberías de la JCAHO de 2006

1. Información básica del producto

- Material 100% de silicona de uso médico que garantiza comodidad para el paciente y durabilidad.
- Conector proximal en Y color lila removible permite cambiar solo el puerto, en lugar de cambiar la sonda.
- Permite utilizar cualquier conector escalonado de nutrición, jeringa punta oral y punta catéter.
- Disco de retención externo que mantiene la sonda en su posición y con perforaciones que permiten la circulación de aire alrededor del estoma.
- Balón de retención que garantiza un sello completo y evita filtraciones de contenido gástrico.
- Graduación en el cuerpo de la sonda que permite vigilar posibles desplazamientos.
- Marca que indica la medida de la sonda (Fr) y la cantidad de agua necesaria para el llenado del balón para evitar inflado insuficiente o excesivo.
- Disponibles desde 12 hasta 24 French.
- Punta de salida redondeada con extremo distal abierto para fácil inserción, comodidad para el paciente y correcta administración de la fórmula.
- Empaque individual estéril.
- Libre de DEHP.
- Conector ENFit.

2. Otras Especificaciones

- Contiene paquete 2,7g de lubricante soluble en agua.
- Uso exclusivo para administración de nutrición enteral.
- Usar únicamente agua estéril para el llenado del balón. Llenar el balón con el 75% del contenido indicado en el cuerpo de la sonda.



3. Presentaciones

CÓDIGO	CALIBRE DEL TUBO FR.	CAPACIDAD DEL BALÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8884715148E	14Fr (4.7mm)	5 CC	Caja x 5 Unid.
8884720163E	16 Fr (5.3mm)	20 CC	Caja x 5 Unid.
8884720189E	18 Fr (6.0mm)	20 CC	Caja x 5 Unid.
8884720205E	20 Fr (6.7mm)	20 CC	Caja x 5 Unid.
8884720221E	22 Fr (7.3mm)	20 CC	Caja x 5 Unid.

Número de Registro INVIMA 2021DM-0023816

Fecha Vencimiento registro: 30/06/2031

Fabricante: Covidien LLC- 15 Hampshire - USA.