

STOMAHESIVE® BARRERA PROTECTORA

Barrera protectora de piel Stomahesive

DESCRIPCIÓN

- Barrera protectora de piel Stomahesive® lisa elaborada en hidrocoloides (carboximetilcelulosa, gelatina y pectina)



Características

- Adhesividad:** Se adhiere a la piel firmemente sin lesionarla y puede permanecer en su sitio hasta por siete días.
- Protector cutáneo no sensibilizante:** Protegen la piel contra irritaciones y no crea reacción alérgica en el paciente.
- Moldeable:** Se adapta a los contornos irregulares de la piel y resulta cómodo durante el uso prolongado.
- Cubierta externa de polietileno:** Prolonga su tiempo de uso. Puede usarse durante la ducha del paciente sin necesidad de cubrirla.

Componentes

La barrera lisa Stomahesive® esta compuesta por sustancias naturales Hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulosa de sodio y poliisobutileno) suspendidas en una cubierta de polietileno.

Uso previsto

- Protección de la piel que pueda estar expuesta al contacto con líquidos irritantes alrededor de abdómenes abiertos, fístulas enterocutáneas y en heridas con drenaje abundante que pueda lesionar la piel.
- También puede usarse para proteger la piel expuesta alrededor de sitios de fístula, entre la base de un estoma y la abertura de la barrera cutánea, y como relleno para pliegues de piel, superficies cutáneas irregulares y cicatrices.

Instrucciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque.

- Valorar las condiciones de la piel circundante. Si la piel esta irritada aplicar primero el Polvo Stomahesive®.
- Limpieza de la piel circundante a la herida con solución estéril.
- Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área para que la barrera se pueda adherir bien.
- Si el área donde se va a colocar la barrera (abdomen) es muy irregular, rellenar los espacios y/o irregularidades con pasta Stomahesive® para asegurar su adhesividad.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2020DM-0022713 Ecuador: 2173-DME-1116 Perú: DM25884E	5 años	Consérvese a temperatura 10°C hasta 30°C.

STOMAHESIVE®

BARRERA PROTECTORA

Barrera protectora de piel Stomahesive

Empaque Primario

Material de empaque:

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso Total (g)
021712	STOMAHESIVE WFR 10X10CM (1X5PK) US	00768455178933	11 x 1 x 11	60
021715	STOMAHESIVE WFR 20X20CM (1X3PK) US	00768455178957	21 x 1 x 21	130

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
021712	STOMAHESIVE WFR 10X10CM (1X5PK) US	00768455106943	12,7 x 34,9 x 12,7	300	5
021715	STOMAHESIVE WFR 20X20CM (1X3PK) US	00768455106967	22,8 x 34,9 x 22,8	390	3

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
021712	STOMAHESIVE WFR 10X10CM (1X5PK) US	10768455106940	13,8 x 26 x 37,1	6,3	20
021715	STOMAHESIVE WFR 20X20CM (1X3PK) US	10768455106964	25,4 x 24,2 x 37,7	4,35	10



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido

*Consultar registro sanitario de cada país



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA

CONVATEC ECUADOR S.A.

CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited

First avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec. Material exclusivo para profesionales de la salud. FUENTE: Datafile ConvaTec