



medicales S.A.S.  
PRODUCTOS PARA SU PROTECCIÓN Y BIENESTAR

## MASCARILLA FACIAL – TAPABOCAS

Código: FT -CCIAL-IMP- TD-006

Versión: 005

Fecha: 19-12-2023

Página 1 de 3

### REGISTRO SANITARIO

- 2018DM-0018838

### VIDA ÚTIL

- 5 AÑOS

### METODO DE ESTERILIZACIÓN

- N/A

### ESTANDARES DE CALIDAD

-Cumple La Norma ISO 22609:2004 EN 14683 : 2019



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Tapabocas o Mascarilla Facial es una barrera importante de protección en el control y ejercicio de la bioseguridad.  
Ideal para uso industrial, sector salud, personal, profesionales de la belleza, manipulación de alimentos, entre otros.

### PRESENTACION COMERCIAL

| LINEA DE TAPABOCAS |                                                                         |               |                                 |                   |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO INTERNO     | DESCRIPCIÓN                                                             | SUBEMPAQUE    | CÓDIGO GENERADO PARA SUBEMPAQUE | CORRUGADO         | CÓDIGO GENERADO PARA CORRUGADO |
| 4810020040         | Tapabocas soporte Elástico, Azul, Empaque Individual, Display x 50 und. | Caja x 50 Und | 7709990829112                   | Caja x 80 Display | N/A                            |
| 4810020020         | Tapabocas soporte Elástico, Azul, Display x 50 und.                     | Caja x 50 Und | 7709990397864                   | Caja x 80 Display | N/A                            |
| 4810020055         | Tapabocas soporte Elástico, USO MEDICO Azul, Display x 50 und.          | Caja x 50 Und | 7709990471632                   | Caja x 80 Display | N/A                            |
| 4810020110         | Tapabocas soporte Tiras USO MEDICO, Blanco, Display x 50 und.           | Caja x 50 Und | 7709990986471                   | Caja x 80 Display | N/A                            |

### USOS RECOMENDADOS

- Producto desechable de un solo uso.
- Debe adaptarse perfectamente bien a la superficie de la cara del usuario, si esto no ocurre, deséchelo.

Cualquier impresión y/o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



servicioalcliente@medicales.com.co



www.medicales.com.co

- El tapabocas o mascarilla facial debe ser colocado antes de colocarse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes. Lavar las manos con agua y jabón antes de poner el Tapabocas y después de su uso.
- Nunca retire los tapabocas o mascarilla facial por el frente, hágalo por la tira de goma o papel.
- No debe retirarse del consultorio o lugar de trabajo con el tapabocas o mascarilla colocado en la cara o en el cuello.



### BENEFICIOS

- Previene efectivamente infecciones transportadas por el aire.
- No irritante para la piel, suave y confortable.
- Actúa como filtro de partículas de polvo pequeñas.
- Libre de fibra de vidrio.
- Libre de látex.
- Hipo-alérgicos.
- Alta capacidad de filtración (Triple Capa)
- Libre de Hebras
- Alta capacidad de BFE (Bacterial filtration efficiency) – EFB (Eficiencia de filtración bacteriana)

### COMPONENTES Y MATERIALES

Sus dos capas de tela en polipropileno no tejido y una capa de filtro melt blown, adaptador nasal anatómico que permite una cobertura nasobucal total y elástico resistente, producto termosellado que ofrece una mayor protección durante su uso.

*Cualquier impresión y/o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA*



- Tamaño: 17.5+/-0.5 x 9.5 cm
- Filtración de tela: 20g/m<sup>2</sup> (±2%)
- Capa Interna: 25g/m<sup>2</sup> (±2%)
- Capa Externa: 18g/m<sup>2</sup> (±2%)
- Dureza (shore A): N.A. (Norma aplicada NTC-467)
- Abrasión: N.A. (Norma aplicada NTC-416 Método NBS)
- Absorción de Agua: N.A. (Norma aplicada NTC-812)
- Sujeción: Elástico y tiras

#### PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La vida útil de este producto, es garantizada por un periodo de 5 años siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las siguientes condiciones de almacenamiento:

- Temperatura máxima: 30°C
- Humedad relativa permanente: máximo 70%

Este producto debe almacenarse en estibas de madera o plástico bien conformadas, que estén separadas del suelo aproximadamente a 10cm.

En el área destinada al almacenamiento, no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, Varsol, gasolina, etc.; que no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.

Los sifones del área de almacenamiento deben tener doble salida a la caja de desagüe, para evitar olores que puedan afectar el producto.

El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes como los de combustión de automotores (monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc.)

En lo posible el almacén debe estar dotado de ventilación adecuada sobre todo en climas cálidos o donde la humedad y la temperatura sobrepasen los límites permitidos.

#### DISPOSICION FINAL

El dispositivo medico debe eliminarse como desecho biológico o disponer de acuerdo al Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios de las instituciones que lo usan y bajo las normas de Disposición de Residuos Hospitalarios.