

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El detergente enzimático de prelavado y limpieza Prolystica 2X es un producto de prelavado y limpieza de baja espuma que elimina los residuos de proteínas y lípidos del instrumental quirúrgico y los productos sanitarios. El detergente enzimático de prelavado y limpieza Prolystica 2X se utiliza para instrumental quirúrgico, endoscopios flexibles de fibra óptica, endoscopios rígidos, bolsas de reanimación manuales y aparatos en los que se acumulan restos de sangre, proteína, mucosa y lípido difíciles de eliminar, o que no se pueden limpiar con medios mecánicos. También se recomienda su uso en los equipos de lavado automático, incluidos los ultrasónicos. Los productos sanitarios se deben esterilizar o desinfectar con medios apropiados en un proceso posterior e independiente. El detergente enzimático de prelavado y limpieza Prolystica 2X es compatible con acero inoxidable, plásticos y metales ligeros, incluido el aluminio.

## CARACTERÍSTICAS

Concentrado  
Sistema enzimático doble  
Sistema de detergente enzimático rápido y eficaz  
pH neutro  
Aplicaciones manuales y automáticas  
Su formulación maximiza la eficacia de la lavadora  
Baja espuma  
Respetuoso con el medio ambiente

## VENTAJAS

Se necesita menos cantidad para mantener un rendimiento óptimo  
Excelente rendimiento proteolítico en una amplia gama de tipos y calidades de agua diferentes  
Eficaz con restos de sangre, grasa, mucosa y otros tipos de suciedad. Especialmente diseñado para su utilización en residuos de origen ortopédico difíciles de limpiar.  
Compatibilidad con sustratos de amplio espectro, incluido el aluminio, el aluminio anodizado y los plásticos  
Se reduce el inventario  
Mantiene la presión del agua para los ciclos de alta presión  
Fácil de aclarar  
Formulado con productos químicos biodegradables

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Presentación ..... Líquido  
Color ..... Entre paja claro y ámbar  
Olor ..... Floral  
pH estándar ..... 7,8  
Gravedad específica estándar ..... 1,06  
Presentación ..... Galón(3.78litros) / 5Galones

## INSTRUCCIONES DE USO

Lavadoras/desinfectadoras automáticas: alimentación automática con dosis de 1 a 4 ml/litro (1/8 a 1/2 fl. oz/gal), en función de la cantidad de suciedad. Aplicaciones manuales/ultrasónicas: dilución de 4 ml/litro (1/2 fl. oz/gal) de agua caliente. La eficacia aumenta si sube la temperatura del agua. Es necesario un período de inmersión de dos a cinco minutos como mínimo. El período de inmersión puede prolongarse más si hay materiales proteínicos secos o si la temperatura del agua es más baja. No se deben superar los 55 °C (130 °F). Después del período de inmersión, aclare bien o pase al siguiente proceso de limpieza. Deseche las soluciones usadas a diario o cuando estén visiblemente sucias.

Se trata de un producto completo. No añada otros productos químicos, como lejía o detergentes. Si lo hace, puede anularse la eficacia de este producto.

Los productos sanitarios se deben esterilizar o desinfectar con medios apropiados en un proceso posterior e independiente.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

---

Almacenar en un lugar fresco (90 °F/32 °C). Mantener fuera del alcance de los niños. Desechar siguiendo las normativas nacionales, regionales y locales. Los contenedores vacíos deben aclararse y desecharse en un contenedor de residuos o reciclarlo si es posible. No usar los contenedores vacíos para otra finalidad.

## MANTENIMIENTO

---

### Ventas

El mantenimiento es crucial para garantizar una calidad constante del funcionamiento y la eficacia del centro. STERIS proporciona un programa de mantenimiento personalizado que garantiza un funcionamiento eficaz y sin problemas.

### Aspectos técnicos

Póngase en contacto con STERIS para recibir más información sobre las aplicaciones del producto o el producto en general, o bien para obtener copias de las hojas de MSDS. Para obtener más información, llame al departamento de asuntos normativos de STERIS en St. Louis al 314-535-1395.

---

**Para obtener más información, póngase en contacto con:**

**STERIS<sup>®</sup>**



STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, OH 44060-1834 • EE. UU.  
440-354-2600 • 800-548-4873  
[www.steris.com](http://www.steris.com)